


Schritt 1: Installation des ProAQT-Sensor

1. Installieren Sie den ProAQT-Sensor zwischen dem arteriellen Katheter und dem Druckaufnehmer
2. Entlüften Sie das komplette System
3. Verbinden Sie den ProAQT Sensor mit dem PulsioFlex Monitor
4. Schließen Sie den arteriellen Druckaufnehmer an den bettseitigen Monitor an

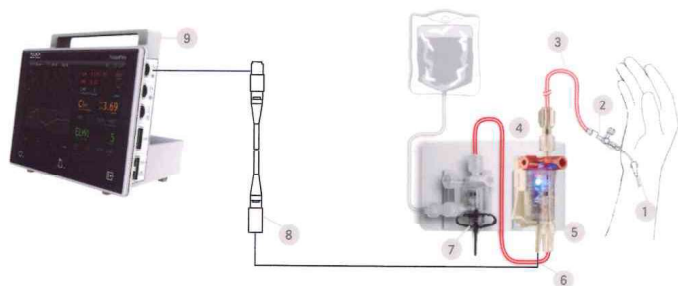

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Beliebiger arterieller Katheter	6	30-cm-Druckleitung zum Druckaufnehmer
2	3-Wege-Hahn zum Spülen des System	7	arterieller Druckaufnehmer
3	Druckleitung zum Patienten	8	ProAQT Sensorkabel (PC45810-300 / 6882750)
4	3-Wege-Hahn für Nullabgleich	9	PulsioFlex Monitor (PC4000 / 6882747)
5	ProAQT Sensor (PV8810 / 6882824)		

Schritt 2: Eingabe der Patientendaten

- Öffnen Sie das Hauptmenü
- Öffnen Sie das Fenster „Patient“
- Geben Sie alle relevanten Daten zu diesem Patienten ein



Schritt 3: Nullabgleich durchführen

- Gehen Sie zum Bildschirm „Nullen AD/ZVD“
- Öffnen Sie den 3-Wege-Hahn (4) zur Atmosphäre
- Führen Sie einen Nullabgleich am PulsioFlex und am bettseitigen Monitor durch
- Schließen Sie den 3-Wege-Hahn (4) zur Atmosphäre



Schritt 4: ProAQT Kalibrierung starten

- Öffnen Sie das Hauptmenü und öffnen das Fenster „ProAQT“
- Drücken Sie die HI/HZV Taste für eine automatische Startwertkalibrierung
- Alternativ: Übernahme/Eingabe des HI/HZV von einer externen Quelle (z. B. Echo)



ProAQT Info-Licht

Zeigt den Status des ProAQT Sensors auf einen Blick:

